

Pro-Matrix[®]

L'art de la
Précision



YOUNG[™]
INNOVATIONS

Maîtrisez l'art de la précision avec Pro-Matrix®

Pro-Matrix est une matrice à usage unique conçue pour la restauration dentaire en amalgame et en composite, utilisable pour toutes les classes de cavités. Deux versions sont disponibles : la version standard Pro-Matrix et la version courbée Pro-Matrix® Curve.

- **Un système tout-en-un**
qui ne nécessite aucun assemblage
ni aucun outil d'application
- **Matrice circonférentielle**
qui peut être utilisée pour les
restaurations MO/OD/MOD
de cuspidé
- **Mécanisme à forte tension**
pour un meilleur compactage
- **Contourage facile de la forme de la dent**
- **Section avant étroite**
pour une meilleure visibilité et plus
de confort pour le patient
- **Utilisable avec tous les matériaux de restauration**
- **Utilisable avec les coins interdentaires et les digues**
- **Totalement jetable**

Avantages supplémentaires de la matrice Pro-Matrix Curve

- Pré-courbée selon la forme de la dent
- Matrice plus longue pour les grosses dents

« La Pro-Matrix est ma matrice préférée car elle est facile à utiliser, polyvalente, et offre d'excellents résultats cliniques. »

Ash Rayarel BDS MFGDP(RU) Msc.
Ash est Chirurgien-dentiste généraliste et
propriétaire de Ash Dental Practice et Ash Aesthetics.



Pro-Matrix®


Pro-Matrix® Curve



Le bouton permet de donner une angulation à la matrice pour un ajustement étroit autour de la dent




Le col étroit améliore la visibilité et l'accès

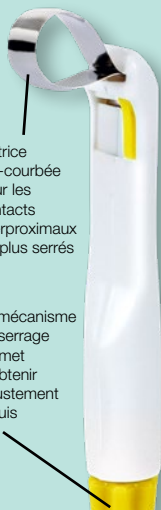

Matrice pré-courbée pour les contacts interproximaux les plus serrés

Le mécanisme de serrage permet d'obtenir l'ajustement requis

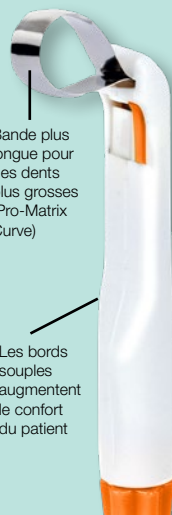

Bande plus longue pour des dents plus grosses (Pro-Matrix Curve)

Les bords souples augmentent le confort du patient

4,5 mm
MATRICE
ÉTROITE


6 mm
MATRICE
LARGE

4,5 mm
MATRICE
ÉTROITE
COURBÉE

6 mm
MATRICE
LARGE
COURBÉE



Pro-Matrix Curve Sondage consultatif sur les soins dentaires

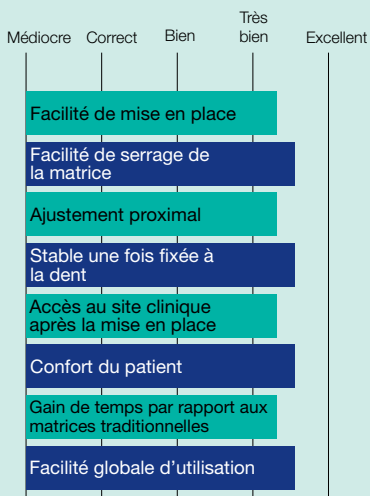

Pro-Matrix
Curve



« Facile à utiliser et à mettre en place, la matrice s'adapte bien à la dent »

« Ajustement facile avec un mécanisme de serrage très sûr et homogène »

« Magnifiques contours proximaux impossibles à obtenir avec une matrice traditionnelle »



Foire Aux Questions

Quelle est la différence entre les quatre couleurs ?

- Verte** : Pro-Matrix Narrow
(4,5 mm) pour les prémolaires et les enfants
- Bleue** : Pro-Matrix Wide (6 mm) pour les molaires
- Jaune** : Pro-Matrix Curve Narrow
(4,5 mm) pour les prémolaires et les enfants
- Orange** : Pro-Matrix Curve Wide
(6 mm) pour les molaires
-

Quel est l'avantage de la Pro-Matrix Curve ?

Les matrices sont pré-courbées pour des restaurations plus naturelles et des points de contact plus prévisibles.

Peut-elle être utilisée avec des coins interdentaires ?

Oui. Tout type de coin interdentaire peut être utilisé.

Quelle est l'épaisseur de la matrice Pro-Matrix ?

0,04 mm

La matrice est-elle autoclavable ?

Non, il s'agit d'un produit jetable à usage unique.

Est-elle stérile à la livraison ?

Non, comme les autres systèmes de matrice. Chaque Pro-Matrix est fournie sous emballage individuel.

Peut-elle être utilisée avec du composite et de l'amalgame ?

Oui. La Pro-Matrix est compatible avec ces deux matériaux grâce à son mécanisme à forte tension permettant le compactage de l'amalgame.

Peut-elle être polie ?

Oui, de la façon habituelle.

Deux Pro-Matrix peuvent-elles être utilisées l'une à côté de l'autre ?

Oui. Elles s'empilent parfaitement pour garantir le confort du patient et une excellente visibilité.



Instructions d'utilisation

1



Bouton



Bouton

Le bouton doit être placé au plus près du bord gingival afin de garantir un bon ajustement autour de la dent.

Avant utilisation, positionnez le bouton en fonction du quadrant de la bouche dans lequel la Pro-Matrix va être utilisée.

2



Ajustez la matrice autour de la dent et serrez en tournant la molette dans le sens horaire. Ne serrez pas de façon excessive. Pour les grosses dents, desserrez la matrice en tournant dans le sens antihoraire.



5



Réalisez la restauration en appliquant la procédure clinique habituelle.

3



4

Pour retirer la matrice, commencez par la desserrer en tournant la molette de 2 à 3 tours dans le sens antihoraire.



Appliquez les coins interdentaires et donnez la forme voulue à la matrice au moyen d'un outil de polissage si nécessaire

Le groupe Contemporary Product Solutions a évalué les matrices à usage unique Pro-Matrix, qui représentent la nouvelle génération de matrices conçue pour répondre à l'évolution des besoins des professionnels de la dentisterie qui réalisent des restaurations en amalgame et en composite.

89 % d'entre eux ont affirmé que pour les restaurations en amalgame et en composite, ils n'avaient jamais eu de matrice aussi simple à utiliser.

88 % ont affirmé qu'ils continueraient d'utiliser ce produit après l'évaluation. La Pro-Matrix a obtenu un score de 4 diamants de la part de l'Academy of Chairside Assisting Evaluators.

« J'ai utilisé les matrices droites Pro-Matrix, et selon moi c'est une évolution naturelle du produit. La forme incurvée de la matrice est parfaite pour obtenir une forme de restauration idéale avec un polissage minimal. »

Dr Indika Weerapperuma
BDS(Brist) Msc(Manc) PGCert(RU) MFDS RCSEd.
Chirurgien-dentiste spécialisé en prosthodontie.



« La rapidité de mise en place de la matrice et la polyvalence d'un système de matrice tout-en-un comparé aux matrices sectionnelles ne doivent pas être sous-estimées pour la réalisation de restaurations de grande ampleur. Il est inutile d'acheter des instruments onéreux tels que des clamps ou des porte-matrices !
LA VIE EST PLUS FACILE ! »

Jeremy Cooper

M. Cooper a été formé à la London Hospital Dental School, promotion 1982. Il a été diplômé en dentisterie générale par le Royal College of Surgeons en 1992. Il a donné de nombreuses conférences et rédigés un grand nombre d'articles professionnels sur la dentisterie qui ont été publiés dans de nombreux journaux. En 2012 il a été invité à devenir membre de l'International Academy of Facial Aesthetics, lors du congrès Greater New York Dental Meeting.





« Les matrices incurvée Pro-Matrix jetables ont été appliquées sur les dents 16 et 25 et stabilisées avec des coins interdentaires de forme anatomique. La mise en place initiale de composite en section mince a été réalisée contre les matrices Pro-Matrix Curve jetables afin de permettre de faire passer la forme de la cavité de la classe II à la classe I le plus rapidement possible, en faisant attention à la forme de la crête marginale et à celle des cuspides. Les restaurations ont été réalisées en appliquant une approche de cuspide à cuspide afin de minimiser les contraintes du facteur C et le risque de formation d'un espace marginal. »

Dr James Robson

Le Dr Robson s'est formé avec VOCO en Allemagne.

Il possède des connaissances approfondies sur les composites et a enseigné à des professionnels en dentisterie générale, des dentistes, des thérapeutes et des étudiants de premier cycle.

Il travaille dans un cabinet privé depuis 2004 et est propriétaire d'un cabinet dentaire situé dans le nord-est de l'Angleterre depuis 2010.

Le Dr Robson est un membre à part entière de la British Academy of Cosmetic Dentistry et plusieurs de ses articles ont été publiés dans des magazines spécialisés et dans la presse générale.



« La matrice Pro-Matrix Curve a été placée par-dessus le clamp de la digue. La plupart du temps, les autres systèmes de matrice ne permettent pas de le faire. J'ai pu réaliser une restauration correcte et le patient était ravi du résultat. Je projette de mettre en place une couronne par la suite. »



Ash Rayarel
BDS MFGDP(RU) Msc.

Ash est Chirurgien-dentiste et propriétaire de Ash Dental Practice et Ash Aesthetics. Il enseigne à des étudiants de premier cycle à l'Université de Manchester, à des étudiants de deuxième et troisième cycle pour Tipton Training et à des étudiants suivant le programme Smile-on Aesthetic and Restorative Dentistry MSc.

« Elles sont faciles à utiliser et à jeter. Je n'ai pas eu peur de me couper les doigts et j'ai pu facilement adapter la matrice à la surface de la dent. »



« Nous avons besoin d'un produit rapide, prévisible et facile à utiliser pour nos restaurations de classe II. Nous accordons beaucoup d'importance à la qualité et la rapidité, et nous avons donc besoin d'un produit capable de réunir ces deux critères. Tous les autres produits de matrice circonférentielle que nous avons essayés étaient encombrants, ou étaient assez longs à mettre en place. L'autre problème que nous avons rencontré est que parfois, les patients, en particulier les enfants, prenaient peur en voyant le gros instrument métallique avancer vers leur bouche. La Pro-Matrix résout ce problème parce que c'est un « joli » petit instrument en plastique coloré et facile à utiliser. Vous le glissez sur la dent, vous tournez et le tour est joué. »

YAHYA MANSOUR, DDS

Le Dr. Mansour est diplômé de l'Université de Californie, Riverside, et détient une licence de biologie et de neurosciences. Il a obtenu une maîtrise de biochimie et de biologie moléculaire, et plus tard un diplôme de docteur en chirurgie dentaire (DDS) à l'Université du Pacifique en 2008. Le Dr. Mansour exerce actuellement en Californie et au Texas et traite des patients de tous âges. Il a gagné le prestigieux prix Fellowship lors de l'International Congress of Oral Implantologists (ICOI) qui s'est tenu en mai 2013 et a obtenu le statut de Board Certified Diplomate en 2016.



« La Pro-Matrix Curve est très facile à mettre en place, et incroyablement polyvalente. Elle peut aussi bien être utilisée sur les petites cavités de classe II que pour les cas plus complexes demandant une restauration de cavités et de cuspidés de grande taille. »

Matthew Holyoak BDS, Dip Rest Dent (RCS Eng), MSc (Rest Dent).

Principle Dentist au Woodlands Dental, Lytham St Annes,
Lancashire Clinical Supervisor MSc Restorative Dentistry,
UCLan School of Medicine & Dentistry.

« J'ai essayé le nouveau système de matrice incurvée Pro-Matrix et je l'ai trouvé très facile à utiliser, moins compliqué que les autres systèmes. Et d'ailleurs les patients l'ont à peine remarqué. Je le recommande vivement ! »

« J'adore la nouvelle matrice incurvée Pro Matrix. Elle est vraiment simple et rapide à poser, et confortable pour le patient. Elle s'adapte bien mieux à la forme de la dent que les autres matrices ! »



YOUNG™

INNOVATIONS

 Microbrush
International

 dry
tips®

YOUNG™

 ZOOBY®

 American Eagle
INSTRUMENTS

 GALAXIE
cassettes

 Pro-Matrix®

 Pro-Tip® TURBO

 NATURES
TIP™

 CRYSTALTIP®

 inSafe

Young Innovations Europe GmbH

Kurfürsten-Anlage 1 | D-69115 Heidelberg | Allemagne

DE: +49 (0) 6221 4345442 | info@ydnnt.eu | www.ydnnt.eu

Pour plus d'informations: www.promatrixdental.fr